



giętkie
200 mm

giętkie
115 mm

szttywne
200 mm

giętkie
115 mm

szttywne
200 mm

SILVERIN® PATYCZKI

PATYCZKI DO WYPALANIA Z AZOTANEM SREBRA – AZOTANEM POTASU WYRÓB MEDYCZNY

- DO STOSOWANIA W ZAOPATRYWANIU I LECZENIU RAN
- DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PĘPOWINY
- DO STOSOWANIA W GINEKOLOGII
- DO PIELĘGNACJI STOMII
- DO LECZENIA BRODAWEK I NAGNIOTKÓW
- DO USUWANIA NAROŚLI

Patyczki do wypalania z azotanem srebra służą do chemicznej kauteryzacji za pomocą umieszczonej na główce mieszanki azotanu srebra i azotanu potasu. Od dawna są one stosowane zewnętrznie jak również opisywane w receptariuszach. Azotan srebra działa bakteriobójczo, ściągająco i powoduje powstanie strupa, przy czym w użyciu z wodą prowadzi do denaturacji białek i w efekcie obumarcia tkanki. Azotan potasu ma na celu złagodzenie działania azotanu srebra. Patyczki Silverin® umożliwiają punktowe zastosowanie substancji czynnej, dzięki czemu działanie jest bardzo precyzyjne i minimalizuje ryzyko zastosowania na okoliczną zdrową skórę.

Obszary zastosowania:

Patyczki do wypalania z azotanem srebra są sprawdzoną metodą usuwania narośli, które mogą powstać w procesie gojenia się ran na skórze, np. w jamach pooperacyjnych z ziarniną. Nadają się do użytku w ramach zaopatrywania i leczenia ran, pielęgnacji stomii i w leczeniu aftowego zapalenia jamy ustnej. Stosowane są do tamowania krwotoków z nosa jak również po krwawieniu występującym po zabiegach biopsji lub też kiedy elektrokautezyzacja byłaby zbyt skomplikowana lub bolesna.

Powszechne zastosowania to usuwanie brodawek oraz podologia (np. w przypadku nagniotków). U noworodków patyczkiem do wypalania łatwo można usunąć pozostałości pępownicy, przy czym zabieg powinien być przeprowadzony przez lekarza lub położną. Procedurę wykonuje się szybko, łatwo i przeważnie jest ona całkowicie bezbolesna. Do użytku dostępne są dwa różne stężenia substancji czynnej (50%, 75%), długości patyczków (115 mm, 200 mm) i dwa rodzaje materiałów z których wykonane są patyczki (drewno - patyczek sztywny, tworzywo sztuczne - patyczek giętki). Różne grupy personelu medycznego mają swoje własne preferencje i nie ma formalnych zaleceń co do stężenia, długości patyczka czy materiału.

Sposób użycia:

Patyczki wypalające z azotanem srebra powinny być stosowane przez wykwalifikowany personel, przy czym wyjątek stanowi tu usuwanie brodawek. Najpierw główkę patyczka wypalającego należy zwilżyć kroplą wody. Nie ma potrzeby zwilżania końcówki jeżeli miejsce, w którym ma być użyty patyczek jest wystarczająco wilgotne. Celem jest naniesienie płynu wzbogaconego azotanem srebra na obszar zastosowania. Patyczek należy wielokrotnie przytknąć w wybranym miejscu. Nie należy go mocno przyciskać. Leczone miejsce przebarwia się i następnie przez kilka dni oddziela się od otaczającej je tkanki. Zmiana barwy skóry może potrwać do 24 godzin. W razie konieczności procedurę należy powtarzać co 2-3 dni aż do osiągnięcia pożądanego efektu. Patyczki z azotanem srebra należy stosować punktowo na zmienionej chorobowo powierzchni i są one przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- U noworodków i osób z wrażliwą skórą kontakt patyczka ze skórą powinien być możliwie jak najkrótszy.
- W przypadku wszelkich zmian skórnych mających nietypowe zabarwienie lub nietypowy kształt, których nie można jednoznacznie zidentyfikować jako tkanki ziarninowa lub pojedyncze brodawki patyczki z azotanem srebra SILVERIN® należy stosować tylko pod nadzorem lekarza.
- Podczas stosowania patyczka należy chronić odzież i inne przedmioty. Azotan srebra powoduje powstanie brązowoczarnych plam, których nie da się usunąć powszechnie stosowanymi środkami czyszczącymi.
- Zdrową skórę, która niezamierzenie miała kontakt z główką patyczka wypalającego należy dokładnie oczyścić gąbką pod bieżącą wodą, przy czym w tym miejscu może dojść do nieszkodliwej zmiany koloru skóry na ciemny. Po ok. 10-14 dniach to przyciemnienie ustępuje.
- W przypadku kontaktu patyczka do wypalania z oczami należy natychmiast przez co najmniej 5 minut bez przerwy płukać otwarte oczy bieżącą wodą i następnie skonsultować się z lekarzem.
- Podczas stosowania w jamie ustnej koniecznie należy zwrócić uwagę na to, żeby nie połknąć żadnej części główki patyczka. Może to powodować poważne powikłania zdrowotne.

Zawartość i wielkość opakowań:

Skład:

Azotan srebra i azotan potasu

Dostępne stężenia substancji czynnej:

50% azotanu srebra

75% azotanu srebra

Wielkości opakowań:

10 i 100 sztuk o długości 115 mm

10 i 100 sztuk o długości 200 mm

Oba rozmiary dostępne są w wersji sztywnej i giętkiej.